


Polycheck® Allergia diagnosztika teljesen automatizált feldolgozás BLOT automatán

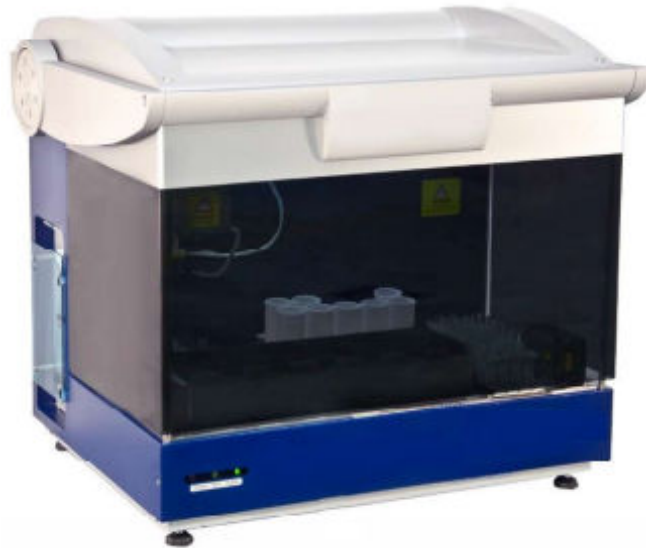

A Blot készülék teljesen automatikus feldolgozással képes kezelni egy eljáráson belül:

- minta kiadagolást
- reagens hozzáadást
- inkubációs időt
- kazetták mosását

Végezetül a feldolgozott kazetták közvetlenül kerülnek feldolgozásra egy digitális színes kamera segítségével a rendszeren belül.

A képeket egy Biocheck képfeldolgozó szoftver értékeli, és az eredmények helyileg tárolhatók, vagy feltölthetők egy nagyobb adatbankba.

- Mind allergia, mind autoimmun panelek feldolgozása lehetséges
- Legfeljebb 36 mintát lehet feldolgozni egy futtatás alkalmával
- Különböző reagensek használata lehetséges egy futtatáson belül
- Minden Polycheck panelt (az allergia és autoimmun tesztek), lehet használni együtt, egy munkameneten belül
- A hozzákapcsolt számítógép kommunikáció a paciens- és eredmény adatok importját és exportját lehetővé teszi
- Vonalkód olvasó a minták azonosításához
- Fűtési rendszer (opcionális a BLOT automata rendszerhez) csökkenti szárítási időt a leolvasási lépés előtt

Magyarországi képviselő és szerviz: MEDI-LAB Kft. 2000 Szentendre, Fiastyúk utca 1/A. www.medi-lab.hu; e-mail: medi-lab@medi-lab.hu; Tel.: (26) 505-325, (26) 505-327